

# werkinstructie absorberend schuimverband Mepilex

versie juli 2021

## doelen van deze werkinstructie

- het absorberend schuimverband inzetten voor de juiste indicatie
- op de juiste manier aanbrengen van het absorberend schuimverband ter bevordering van een optimale wondgenezing bij een complexe wond

### uitvoerder/op afdeling/locatie

- deze werkinstructie is te gebruiken in de regio Midden-Brabant
- de medisch behandelaar is verantwoordelijk voor de medische diagnose gebaseerd op de onderliggende pathologie
- wondconsulenten, wondverpleegkundigen of verpleegkundig specialist WEC zijn verantwoordelijk voor de gekozen behandeling en de gevoerde regie rondom de patiënt met een wond
- aandachtvelders wond hebben een coachende en adviserende rol in het wond- en verbandbeleid binnen hun team
- verpleegkundigen en/of verpleegkundigen in opleiding onder (in)directe begeleiding, verzorgenden, praktijkondersteuners en doktersassistenten inventariseren de risicofactoren, beargumenteren de inzet van het verband en brengen het verband aan

### indicaties

- vochtige wonden
- wonden rood/geel/zwart
- decubitus
- niet-intacte blaren
- diabetes voetulcera
- ulcus cruris\*
- chirurgische wonden
- traumawonden
- snij- en schaafwonden
- donorsites
- oppervlakkige 2<sup>de</sup>-graads brandwonden
- skintears categorie 3
- oncologische wonden
- oncologische ulcera
- erysipelas

### contra-indicatie

- het verband niet gebruiken in combinatie met natriumhypochloriet en azijnzuuroplossingen of waterstofperoxide, deze oplossingen kunnen het schuimverband afbreken

\*veneuze ulcera/arteriële ulcera/beenulcera van gemengde etiologie

### aandachtspunten/veiligheid

- de aandachtsvelder wond, wondverpleegkundige/ consulente of verpleegkundig specialist WEC mag de wondbehandeling en frequentie aanpassen binnen de richtlijnen, werkinstructies en praktijkkaarten van het Zorgnetwerk Midden Brabant
- bij twijfel over de wondbehandeling neemt de verpleegkundige contact op met de aandachtsvelder wond of, bij diens afwezigheid, met de wondverpleegkundige, wondconsulente of verpleegkundig specialist van het WEC
- de wondverpleegkundige, wondconsulente of verpleegkundig specialist van het WEC neemt zo nodig contact op met een andere discipline of zorgverlener
- als de zorg door een andere zorgverlener gebeurt of het beleid moet door een andere zorgverlener geëvalueerd of herzien worden, moet er altijd een overdracht worden meegegeven aan de patiënt/cliënt
- werk tijdens de wondzorg volgens de werkinstructie hygiënische aspecten
- desinfectie van kleine oppervlakten moet met alcohol 70% gebeuren, gebruik hiervoor een papieren doek, de inwerktijd is 30 seconden
- als een verbandmiddel wordt geopend en met een papieren pleister wordt afgesloten en in een afgesloten box wordt bewaard, moet die 7 dagen na openen weggegooid worden
- de afgesloten box mag niet in de badkamer of op de grond staan
- het verband kan worden toegepast onder compressietherapie
- het verband kan worden opgelicht en teruggeplaatst
- het verband mag maximaal 7 dagen blijven zitten
- verwissel het verband als: er lekkage optreedt; het verband voor 75% is verzadigd; het verband verzadigd is op 2 centimeter van de rand van het verband
- het verband (zonder border) kan op maat geknipt worden

### verklarende woordenlijst

- een wond is een verbreking van de continuïteit van weefsel veroorzaakt door een trauma of pathologische aandoening
- een complexe wond is een wond met een verstoorde genezingstendens als gevolg van pathofysiologische factoren

# werkwijze absorberend schuimverband Mepilex

bronnen: wondenboek WCS en bijsluiters verbandmiddelen

informeer de patiënt/cliënt voor en tijdens de handeling omtrent de wondbehandeling en check voor en na de handeling of de informatie begrepen is

## benodigdheden

- plaats de benodigdheden op een met alcohol 70% gedesinfecteerde harde ondergrond
- afvalzakje
  - niet-steriele handschoenen
  - niet-steriele non woven gazen 10 x 10 cm
  - steriele/met alcohol 70% gedesinfecteerde schaar
  - juiste maat absorberend schuimverband
  - fixatiemateriaal: pleister, zwachtel of transparante folie

## handelingen

- denk aan eventuele pijnmedicatie
- pas handhygiëne toe
- neem maatregelen voor de privacy
- informeer de patiënt/cliënt
- help de patiënt/cliënt in een juiste positie
- pas handhygiëne toe
- trek handschoenen aan
- verwijder het oude verband en deponeer dat in het afvalzakje
- maak de wond, zo nodig, schoon met pincet, onder lauwwarm stromend water of met in water gedrenkte gazen
- verwijder met een non woven gaas het overtollig vocht
- maak ook de huid rondom de wond goed schoon en droog
- verwijder de handschoenen en deponeer die in de afvalzak
- pas handhygiëne toe
- trek nieuwe handschoenen aan
- haal het absorberend schuimverband uit de verpakking
- verwijder het schutblad
- zorg dat het verband wordt aangebracht met een overlap van minimum 2 centimeter op de omliggende huid (aanbeveling bij veel exsudaat: houd een overlap van 3 tot 4 centimeter aan)
- breng de klevende zijde op de wond aan
- het verband niet uittrekken
- fixeer het verband indien nodig
- verwijder de handschoenen en deponeer die in de afvalzak
- pas handhygiëne toe
- sluit geopende materialen af met een papieren pleister
- bewaren in een afgesloten box
- desinfecteer verbandschaar, werkblad of schoon werkveld met alcohol 70%
- help de patiënt/cliënt in een comfortabele houding
- voer plastic afvalzakje gesloten af
- pas handhygiëne toe
- noteer de handeling en eventueel bevindingen met een notitie in het dossier en pas zo nodig de wondregistratie aan

## verslaglegging

- de zorgverlener heeft de wondregistratie geraadpleegd voor het te volgen wondbeleid en de benodigde materialen
- maak in het dossier een wondregistratie aan en schrijf bijzonderheden in een notitie
- registreer bij elke (nieuwe) patiënt/cliënt elke (nieuwe) wond binnen 24 uur
- evalueer en registreer elke bestaande wond wekelijks
- registreer daarnaast elke verandering van de wond

## productinformatie

- polyurethaan film op de rugzijde
- lucht- en waterdamp doorlaatbaar
- virus- en bacteriebestendig (> 25nM)
- drielaags wondkussen
- absorbeert veel exsudaat
- minder risico op lekkage, verweking en maceratie
- het zelfklevend absorberend verband minimaliseert pijn en weefseltrauma
- het heeft een uitstekend exsudaat management
- blijft zonder hulp ter plaatse, dat vereenvoudigt het aanbrengen van druk- of fixeerverbanden
- geschikt voor gebruik onder drukverbanden
- weinig kans op huidirritatie of allergische reactie
- Mepilex border is douchebestendig

## bestellen

- bij Bosman
- via de apotheek

